
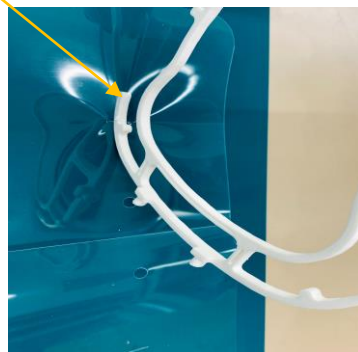



KARATANI Faceshield Type D7 組立説明書

【クリアフォルダの取付方法】


Step 1: フェイシールド[®] を45° ぐらい斜めにして、フェイシールド[®] 左端を穴①に入れる。

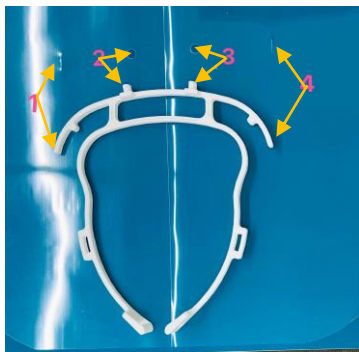

Step 2: フェイシールド[®] をクリアフォルダ[®] に当て、フェイシールド[®] の右端を穴④に入れる。

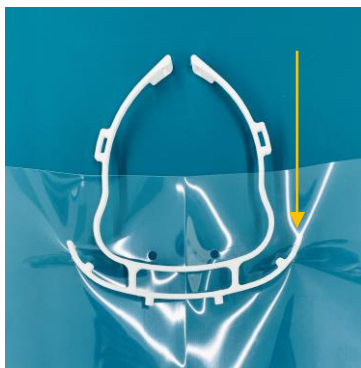

Step 3: フェイシールド[®] の両端を入れた状態でフェイシールド[®] を90度起こすと、穴②と穴③に丸型ストッパーが入り組立完成

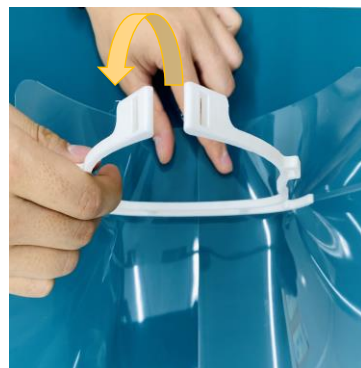

【組立完成】

